

NÁVOD NA POUŽITIE

Príloha Čistenie (dekontaminácia) pľuvadlovej misy a odsávacích hadíc pre stomatologické súpravy Diplomat Adept DA270, DA280.

Účel a použitie čistenia pľuvadlovej misy a odsávacích hadíc

Čistenie odpadových ciest pre oplach misy a odsávacích hadíc veľkej a malej odsávačky sa vykonáva za účelom odstránenia choroboplodných zárodkov a vyčistenia odpadovej a odsávacej sústavy separátora resp. odlučovača amalgámu inštalovaného v stomatologickej súprave. Riadiaca elektronika stomatologickej súpravy je navrhnutá tak, aby umožňovala dva režimy čistenia.

Cielené vyčistenie pľuvadlovej misy a odsávacích hadíc veľkej a malej odsávačky, to znamená, že sa vykoná len raz po jej aktivovaní. Slúži na cielenú dekontamináciu súpravy na začiatku resp. konci pracovného dňa, prípadne pri odstávke súpravy na dlhší čas.

Priebežné (trvalé) čistenie odsávacích hadíc veľkej a malej odsávačky funguje tak, že počas normálnej prevádzky sa pri každom odložení odsávačky automaticky vykoná prečistenie odsávacích hadíc (po dobu 7s).

Súprava sama zabezpečuje, aby sa čistiaci roztok primiešaval do vody pre oplach misy a odsávacích hadíc .

V prípade, že v stomatologickej súprave je zabudovaný separátor CATTANI alebo odlučovač amalgámu METASYS, je nutné ako čistiaci roztok používať prostriedok GREEN & CLEAN M2. Tento prostriedok sa musí použiť minimálne 2-krát počas každého pracovného dňa na cielené prečistenie oplachu misy a odsávacích hadíc. Využitie priebežného čistenia odsávacích hadíc je na osobnom rozhodnutí obsluhujúceho personálu. Ako zásobník pre čistiaci roztok slúži plastová nádoba označená zeleným štítkom s názvom GREEN & CLEAN M2.




Upozornenie

Dopĺňanie čistiaceho roztoku do zásobníku je možné len pri vypnutom hlavnom vypínači stomatologickej súpravy.

Priebežné (trvalé) čistenie odsávacích hadíc veľkej a malej odsávačky

Ovládanie priebežného čistenia odsávacích hadíc

PR1 – zapína /vypína priebežné čistenie odsávacích hadíc

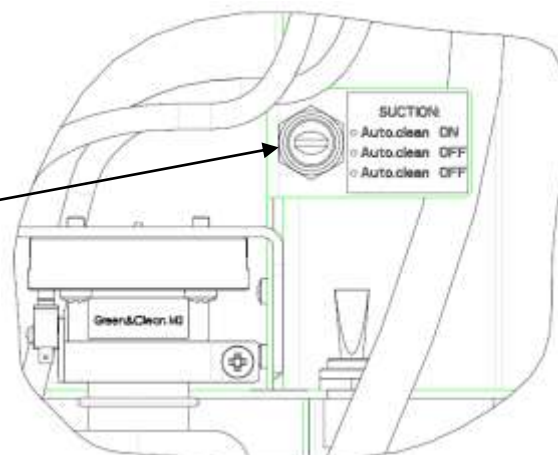


NÁVOD NA POUŽITIE

Priebežné čistenie odsávacích hadíc sa zapína prepnutím prepínača PR1, umiestnenom v pľuvadlovom bloku, do polohy **ON**.

Pri zapnutom priebežnom (trvalom) čistení odsávacích hadíc veľkej a malej odsávačky sa po každom odložení odsávačiek (obe odsávačky musia byť v držiaku) vykoná automatické prečistenie pri ktorom sa hadice a odpadové cesty prepláchnu vodou s primiešaním čistiaceho roztoku (GREEN & CLEAN M2). Táto procedúra trvá cca. 7s po odložení odsávačky. Po odložení odsávačky do držiaku táto zostáva v činnosti po dobu cca. 7s.

Cielené prečistenie pľuvadlovej misy a odsávacích hadíc veľkej a malej odsávačky

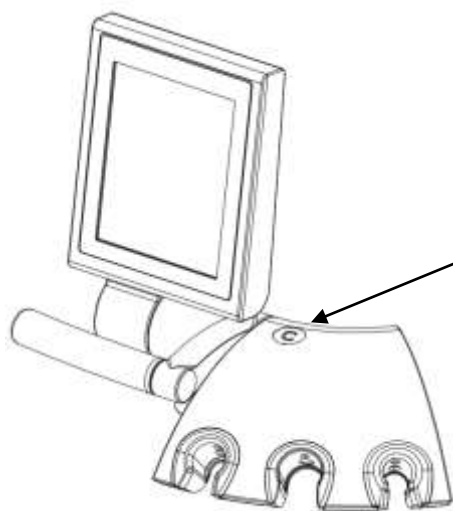

Ovládanie cieleného prečistenia pľuvadlovej misy a odsávacích hadíc veľkej a malej odsávačky

Tlačidlo C – zapína /vypína cielené vyčistenie pľuvadlovej misy a odsávacích hadíc veľkej a malej odsávačky

Cielené vyčistenie pľuvadlovej misy a odsávacích hadíc veľkej a malej odsávačky sa vykoná pre odsávačky a oplach misy zároveň. Touto procedúrou sa prečistia odsávacie hadice veľkej a malej odsávačky a príslušné odpadové cesty a misa s odpadovými cestami. Celková doba trvania cieleného čistenia je 55s.

Procedúra sa vykoná stlačením tlačidla C. Cielené prečistenie je možné ukončiť stlačením tlačidla C. Pre vykonanie cieleného vyčistenia pľuvadlovej misy a odsávacích hadíc veľkej a malej odsávačky musia byť obe odsávačky v držiakoch. V prípade vybratia sa čistenie ukončí.



Upozornenie

Čistenie sa nespustí pokiaľ je fľaša s čistiacim roztokom prázdna. Prázdna fľaša s čistiacim roztokom je indikovaná pípnutím pri vyvolaní čistenia.